

EMULADOR QUÍMICO TIPO 6 para VAPOR



- ▶ Conforme norma ISO 11140-1, Tipo 6.
- ▶ Reage a todos os parâmetros críticos da esterilização, emulando um ciclo definido de 18 min. a 134°C.
- ▶ Mudança de coloração Amarelo para Preto.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O TSI-T603P é um emulador químico tipo i6 conforme ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014 desenvolvido em substrato polimérico para o monitoramento do processo de esterilização a vapor saturado em um ciclo pré-determinado de validação, avaliando todas as variáveis críticas do processo (temperatura, tempo e presença de VAPOR) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização.

O TSI-T603P pode ser utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou vácuo assistido operando em 134°C durante 18 minutos de exposição direta.

VALORES DECLARADOS

134°C - 18 minutos

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque o TSI-T603P em todos os pacotes e caixas que serão esterilizados. Para pacotes / caixas grandes coloque várias tiras bem distribuídas.
2. Esterilize os pacotes / caixas conforme recomendados pelo fabricante.
3. Após o ciclo de esterilização observe se o indicador químico muda da cor amarelo para preto. CUIDADO: Utilize EPI adequado na retirada do pacote / caixa do esterilizador, a fim de evitar queimaduras.
4. Se o indicador químico estiver com a cor amarela após o ciclo de esterilização, isto indica que as condições de esterilização não foram alcançadas e os itens devem ser reprocessados.
5. Após a verificação, remova o liner do adesivo e cole o indicador no local onde será arquivado.

PRECAUÇÕES

1. Caso haja alguma dúvida sobre a mudança de cor do indicador, os pacotes não devem ser considerados esterilizados.
2. Não utilize qualquer tira do indicador que não esteja com o indicador químico na cor amarela antes da exposição ao ciclo de esterilização a vapor.


CARACTERÍSTICAS

Dimensões: 5,7cm x 1,99cm.


Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente 10°C a 35°C e 10% a 70% de umidade, após aberto mantenha o pacote do indicador TSI-T603P hermeticamente fechado.

Embalagem: pacote com 250 testes de TSI-T603P.


Identificação: lote e data de validade estão impressos em cada indicador

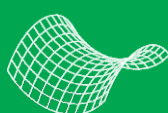


GUIA DE INTERPRETAÇÃO

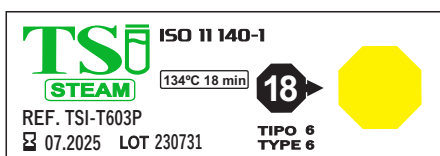

NÃO PROCESSADO




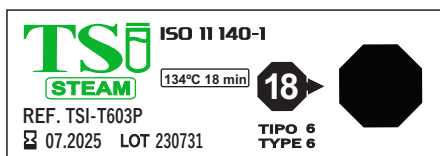


APROVADO

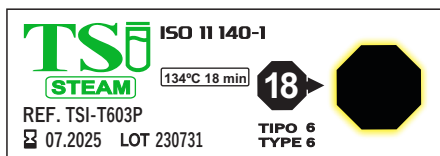

APROVADO
CICLO EXCESSIVO

REPROVADO

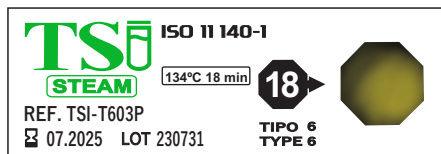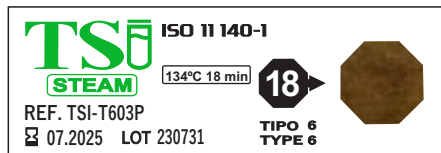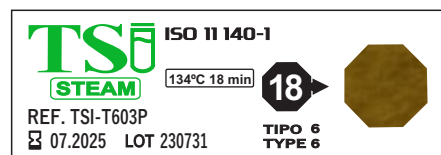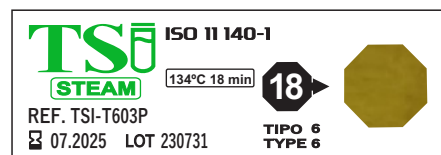

Registro no MS. Produto não considerado "Dispositivo para Saúde" conforme RDC 751/2022 - ANVISA

Fabricante: TECHSTERI LTDA. CNPJ. 40.772.091/0001-06
SAC:(43) 3357-8351 - E-mail: sac@techsteri.com

Rev.:04042024



TechSteri
Tecnologia em Esterilização